



vario maxi

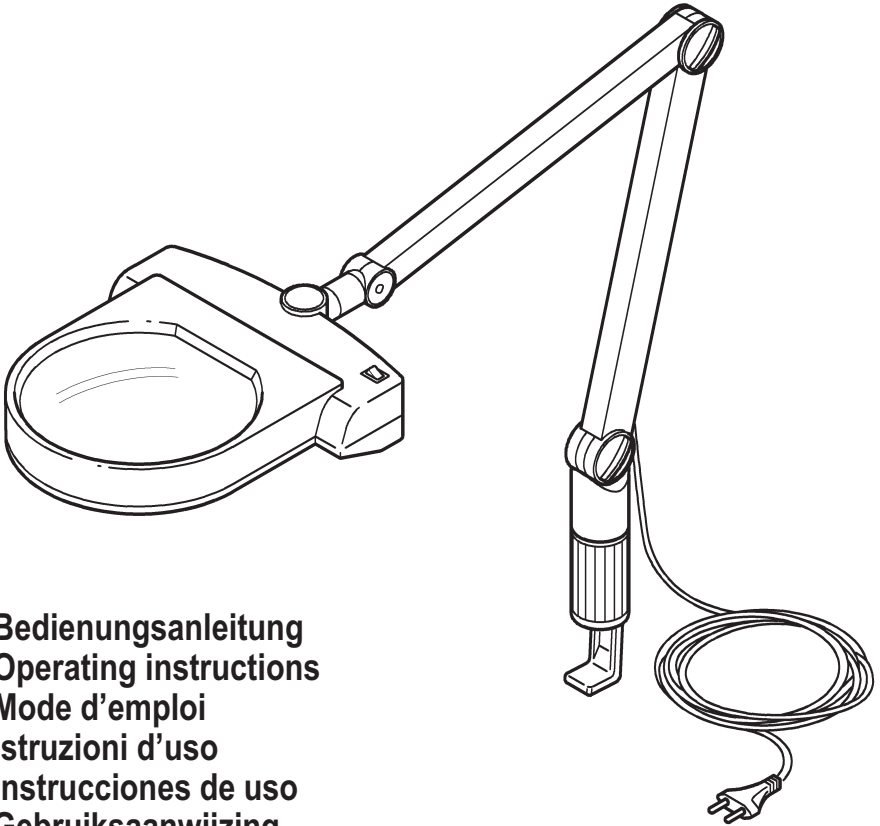

Bedienungsanleitung
Operating instructions
Mode d'emploi
Istruzioni d'uso
Instrucciones de uso
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Návod k použití
Instrukcja obsługi
サービスマニュアル



ESCHENBACH
Germany

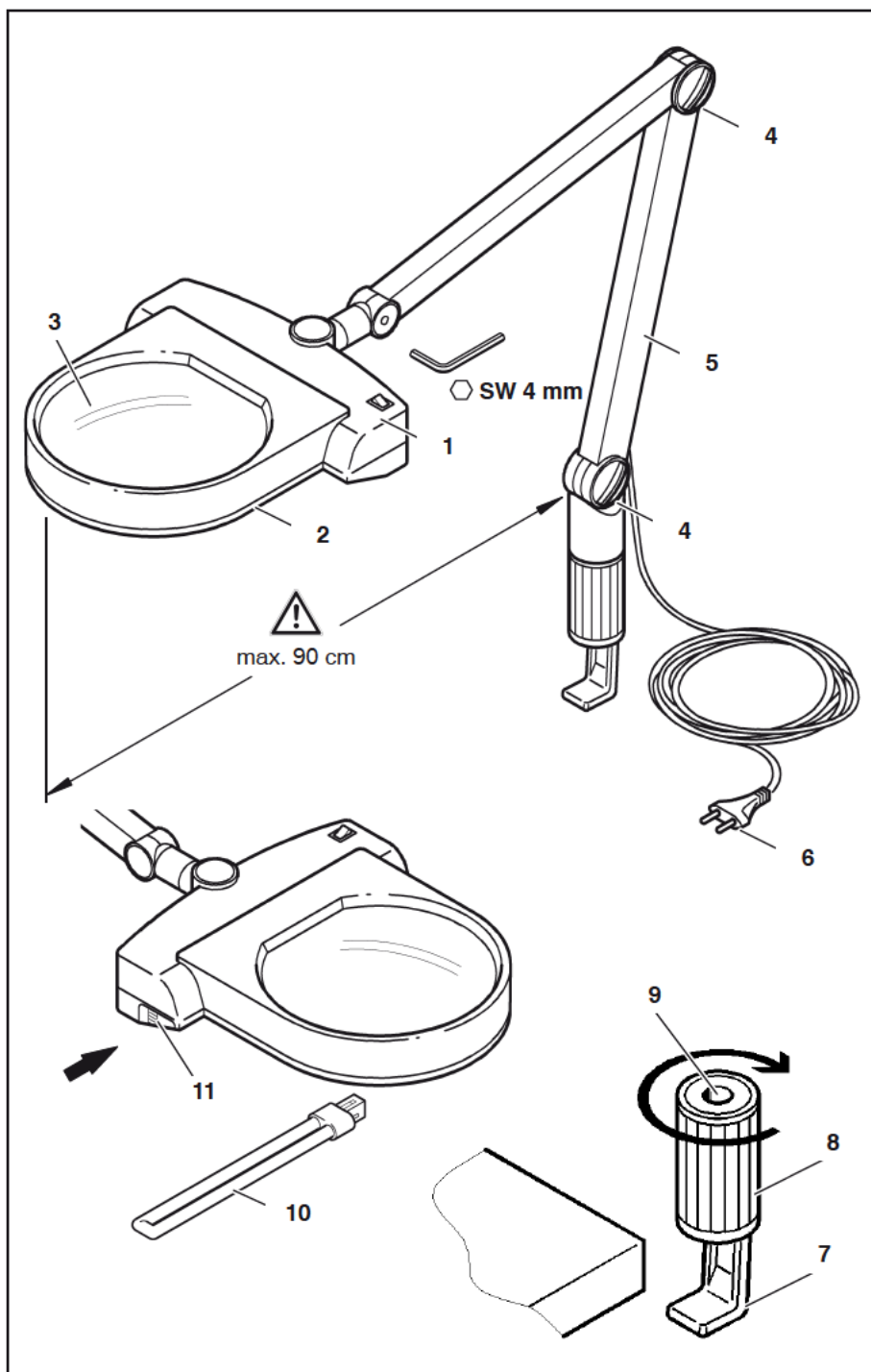

Deutsch

Standlesegläser von Eschenbach. Für mehr Lebensqualität.

Sie haben ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Eschenbach erworben, das nach modernsten Fertigungsverfahren in Deutschland hergestellt wurde, ein Markenprodukt „Made in Germany“. Wir beglückwünschen Sie zu dieser Entscheidung.

Die Linse aus hochwertigem, unzerbrechlichem PXM®-Material ist mit cera-tec® Hartbeschichtung geschützt. Kratzfestigkeit ist ein entscheidendes Kriterium für Qualität und Gebrauchsdauer der Linse.

Deutsch	3
English	5
Français	6
Italiano	7
Español	9
Nederlands	10
Dansk	12
Svenska	13
Norsk	14
Suomi	15
Polski	17
Česki	18
日本語	20

⚠ Sicherheitshinweise

- **Brandgefahr!**
Linsen in optischen Geräten können bei unsachgemäßer Handhabung oder Lagerung durch die „Brennglaswirkung“ erhebliche Schäden anrichten! Achten Sie darauf, dass optische Linsen nie ohne Abdeckung in der Sonne liegen!
- **Blendungs- und Verletzungsgefahr!**
Sehen Sie niemals mit optischen Geräten in die Sonne!
- **Schützen Sie Ihr Standleseglas vor Stoß oder Schlag, Feuchtigkeit und übermäßiger Wärme. Legen Sie Ihr Standleseglas nie auf Heizkörper oder in die Sonne.**
- **Die Klemmschrauben [4] müssen bei der Verwendung des Standleseglases festgeschraubt sein!**
- **Verwenden Sie das Standleseglas nicht in der Nähe von Behältern die mit Wasser gefüllt sind!**
- **Stolpergefahr!**
Achten Sie darauf, dass die Anschlußleitung keine Gefahr darstellt! Wickeln Sie die Anschlußleitung nicht um das Standleseglas!

- **Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieses Standleseglasses ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.**
- **Weisen Sie auch andere Personen auf diese Gefahren hin!**

Standleseglass montieren

- [1] EIN- / AUS-Schalter
- [2] Gehäuse
- [3] Linse
- [4] Klemmschraube
- [5] Schwenkstativ
- [6] Netzstecker mit 3 m Netzleitung
- [7] Tischklemme
- [8] Klemmzylinder
- [9] Bohrung für Schwenkstativ
- [10] Lampe
- [11] Lampenabdeckung

-
1. Schrauben Sie die Tischklemme [7] mit dem Klemmzylinder [8] an einer Tischplatte fest.
 2. Stecken Sie das Schwenkstativ [5] in die Bohrung [9] der Tischklemme.
 3. Stecken Sie den Netzstecker [6] in eine Netzsteckdose.
 4. Schalten Sie mit dem Schalter [1] die Lampe ein.
 5. Stellen Sie das Standleseglass auf die entsprechende Arbeits- / Lesehöhe ein.
- Eine leichte Erwärmung der Lampe ist normal. Der Netzstecker kann auch nach dem Ausschalten der Beleuchtung in der Netzsteckdose belassen werden.

Lampe wechseln

1. **Ziehen Sie den Netzstecker [6] aus der Netzsteckdose.**
 2. Zum Entriegeln der Lampenabdeckung [11] drücken Sie in Pfeilrichtung und Entfernen die Lampenabdeckung nach unten.
- Verwenden Sie nur den in den technischen Daten angegebenen Lampen-Typ. Ersatz-Leuchtstofflampen sind im Optik-Fachhandel erhältlich.
3. Tauschen Sie die defekte gegen eine neue Lampe [10].

Pflegehinweise

- **Ziehen Sie den Netzstecker [6] aus der Netzsteckdose.**

Reinigen Sie Gehäuse und Stativ mit einem feuchten Tuch. Reinigen Sie die Linse mit einem weichen, fusselfreien Tuch (z. B. Brillenputztuch). Bei stärkerer Verschmutzung (z. B. Fingerabdrücken) die Linse mit einem feuchten Tuch vorsichtig reinigen.

Verwenden Sie keine Seifenlösungen, die Weichmacher enthalten, keine alkoholischen Lösungsmittel und keine scheuernden Reinigungsmittel! Die Linsen könnten zerstört werden.

Technische Daten

Standleseglass:	Best.-Nr. 2771 1
Durchmesser	220 mm
Vergrößerung	3,0 dpt. / 1,75x
Lampe:	Best.-Nr. 1603 2
Netzspannung:	230 V, 50 Hz
Schwenkstativ-ausladung:	900 mm

Datum / Date / Data / Fecha / Datum aanschaf / Dato / Päivämäärä / 日付

Firmenstempel und Unterschrift des Händlers
Timbro con denominazione della ditta e firma del rivenditore
Company stamp and signature of dealer
Cachet et signature du négociant
Sello y firma del vendedor
Firmastempel en handtekening van leverancier
Forhandlerens stempel og underskrift
Företagsstämpel och säljarens underskrift
Firmastempel og forhandlerens underskrift
Yrityksen leima ja myyjän allekirjoitus
Firemní razítka a podpis obchodníka
Pieczęćka firmy i podpis sprzedawc
取扱店の社印および署名

